

FLYTANDE SÅRPLAST



- ett sårplast förband baserad på akryl copolymer för enkel och snabb behandling av skrapssår och mindre skador.
- efter applikation, torkar den inom 3 minuter.
- den bildar en vattensäker skyddande hinna.
- förbandet är inte vattenlösligt.
- den hindrar mikro-organismer från omgivande miljö.
- den hindrar inte naturlig hud svettning.
- såret förblir stängt mot ogynnsamma påverkningar, dock fortgår läkeprocessen under plastfilmen.
- sårförbandet försvinner av sig själv efter 3-4 dagar genom gradvis förtunning av plasthinnan genom nötning.

Produktfakta

Sårplast spray är en aerosol med snabbtorkande sårplast. Den är tillverkad av akryl copolymer plast.

Sårplast spray ger en snabbt och säkert skydd. Den är gjord för att skydda mindre sår och skador såsom *rivsår*, *skrubbsår* och *skårsår* på arbetsplatser, sportutövande och i hemmet.

Egenskaper och fördelar

Sårplast spray minskar risken för infektion, skyddar mot vatten och smuts vilket ger en säker duschning och vistelse i blöt miljö eller dammiga och smutsiga arbetsplatser, enkel- bekväm och säker att använda, bra på områden där det är svårt att använda vanliga plåster och förband.

Användningsområden

Den behändiga sprayförpackningen ger en enkel, snabb, effektiv och säker hjälp för behandling av mindre sår. Lämplig på arbetsplatsen, vid sportutövande och i hemmet där man önskar en snabb och effektiv behandling. Den *skall inte* användas att täcka sår med stor blödning.

Användning

Spraya från ett avstånd på ca 15 - 20 cm. Spraya ett tunt lager, låt torka och upprepa behandlingen. För ett bra resultat, spraya flera tunna lager. Skaka flaskan innan varje ny användning.

Innehåll: Ethyl acetat, Copolymer acrylate Drivgas: Dimetyleter



Artikelnummer. 913302

STUNDAB
STÅD & UNDERHÅLLS PRODUKTER

www.stundab.se info@stundab.se

Fax. +46 (0)8 54900887 Tel. +46 (0)8 54900888